



GUIDE D'UTILISATION SYSTÈME D'AMPLIFICATION MOBILE CONNECT

- 1 Téléchargez l'application **MobileConnect Sennheiser**.



Liens de
téléchargements



AppStore
iPhone



GooglePlay
Android

- 2 Fermez toutes les applications ouvertes sur votre smartphone.

- 3 Connectez votre smartphone au Wifi suivant :



- 4 Assurez-vous que votre appareil auditif soit relié en bluetooth à votre smartphone.

- 5 Ouvrez l'application et sélectionnez le canal d'écoute
« **Plateau Molière** ».

- 6 Réglez le son à votre convenance grâce à l'interface de l'application (réception optimale lorsque vous êtes dans les coursives et à l'intérieur de la grande salle)

- 7 Vous êtes prêt·e·s à découvrir le spectacle !

Remarques

Pour profiter pleinement de l'expérience, pensez à couper le volume habituel de votre appareil auditif.

Si vous avez des questions ou des retours à nous faire sur le fonctionnement du dispositif, n'hésitez pas à nous contacter par mail à relationpublics@tmsete.com