



## GUIDE D'UTILISATION SYSTÈME D'AMPLIFICATION MOBILE CONNECT

---

- 1 Téléchargez l'application **MobileConnect Sennheiser**.




Liens de  
téléchargements



AppStore  
iPhone



GooglePlay  
Android

- 2 Fermez toutes les applications ouvertes sur votre smartphone.
- 3 Connectez votre smartphone au Wifi suivant :  
 **Wifi-MobileConnect**
- 4 Assurez-vous que votre appareil auditif soit relié en bluetooth à votre smartphone.
- 5 Ouvrez l'application et sélectionnez le canal d'écoute « **Plateau Molière** ».
- 6 Réglez le son à votre convenance grâce à l'interface de l'application (réception optimale lorsque vous êtes dans les coursives et à l'intérieur de la grande salle)
- 7 Vous êtes prêt·e·s à découvrir le spectacle !

---

### Remarques

Pour profiter pleinement de l'expérience, pensez à couper le volume habituel de votre appareil auditif.

Si vous avez des questions ou des retours à nous faire sur le fonctionnement du dispositif, n'hésitez pas à nous contacter par mail à [relationpublics@tmsete.com](mailto:relationpublics@tmsete.com)